

Exélia Art micro / micro Petite

Заушные слуховые аппараты

Руководство пользователя



PHONAK

life is on

0459

АЯ 46

Введение

В Вашем новом слуховом аппарате **Exélia Art** использованы последние достижения цифровых технологий. **Exélia Art** работает автоматически, обеспечивая наивысшее качество звучания и комфортность в любой обстановке. Высокие технологии превратили сложнейшие слуховые аппараты в удобные и простые в обращении устройства.

Чтобы воспользоваться всеми функциями Вашего нового слухового аппарата, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к специалисту.

Exélia Art – это высококачественный слуховой аппарат, созданный швейцарской компанией Phonak, мировым лидером в области технологии, инноваций и надежности слуховых аппаратов. При надлежащем уходе и соблюдении правил эксплуатации слуховой аппарат надежно прослужит Вам долгие годы.

Чтобы больше узнать о Вашем слуховом аппарате, посетите страничку Phonak в интернете: www.phonak.com

Phonak – life is on!

Phonak – жизнь продолжается!

⊙ Этим символом отмечены функции, опции и аксессуары, доступные для Exélia Art micro, но не доступные для Exélia Art micro Petite.

Описание

В цифровых заушных слуховых аппаратах **Exélia Art micro** применяется 20-канальная система обработки звука SoundFlow Premium. Используется непрерывная автоматическая адаптация к окружающей звуковой обстановке. Реализована 33-канальная система направленности VoiceZoom. Подавление обратной связи осуществляется с использованием инновационной технологии WhistleBlock. Применяется система восстановления акустических свойств ушной раковины Real Ear Sound. Действует активное уменьшение эха EchoBlock и подавление шума ветра NoiseBlock Processing.


● Реализован выбор направления прослушивания с помощью переключателя программ. ● Предусмотрена возможность двусторонней передачи звука при разговоре по телефону. ● Аппараты снабжены переключателем программ.

Основные технические характеристики в соответствии со стандартом IEC 60118-7 и IEC 60126 (2см³ coupler)

Параметр/модель	Exélia Art micro	Exélia Art micro Petite
Мах усиление, дБ	53	46
Мах вых. уровень звукового давления (ВУЗД ₉₀), дБ	127	126
Частотный диапазон, Гц	<100-7100	<100-7600



Слуховой аппарат с микрозвуководом и стандартным вкладышем


- (1) Отверстия микрофонов с защитным фильтром
- (2) Переключатель программ 
- (3) Батарейный отсек с функцией ВКЛ/ВЫКЛ
- (4) Микрозвуковод
- (5) Стандартный ушной вкладыш
- (6) Фиксатор

Слуховой аппарат с микрозвуководом и вкладышем SlimTip

(1)-(4) См. предыдущую страницу

(5) Индивидуальный вкладыш SlimTip

(6) Струна для извлечения вкладыша

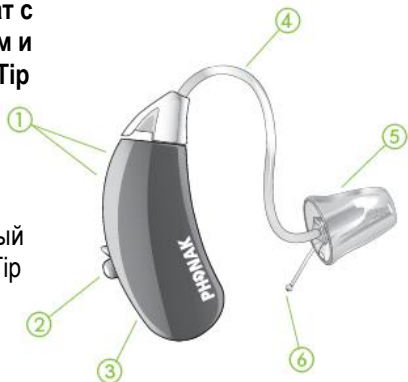

Слуховой аппарат с индивидуальным ушным вкладышем

(1)-(3) См. предыдущую страницу

(4) Рожок-звуконвод


(5) Индивидуальный ушной вкладыш



Краткое введение


Установка элемента питания

Подробное описание см. ниже

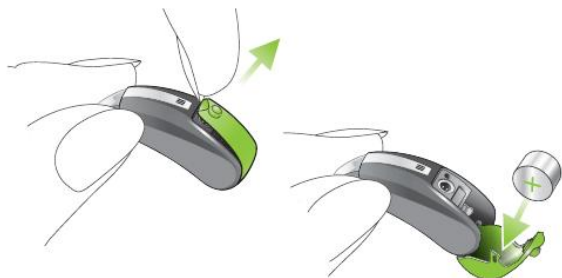

Включение и выключение

Подробное описание см. ниже

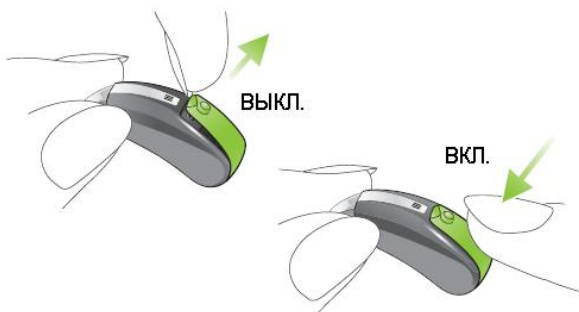

Переключение программ

Подробное описание см. ниже



Подготовка к работе

Замена элемента питания


Слуховые аппараты Exélia Art micro работают с батарейками типоразмера 13.

Слуховые аппараты Exélia Art micro Petite работают с батарейками типоразмеров 10 или 312.

Кончиком ногтя полностью откройте батарейный отсек и выньте старую батарею.



Вставьте новую батарею так, чтобы знак "+" на плоской стороне батареи был направлен в ту же сторону, что и знак "+" на батарейном отсеке. Правильное положение батареи также изображено внутри батарейного отсека. Закройте дверцу батарейного отсека.

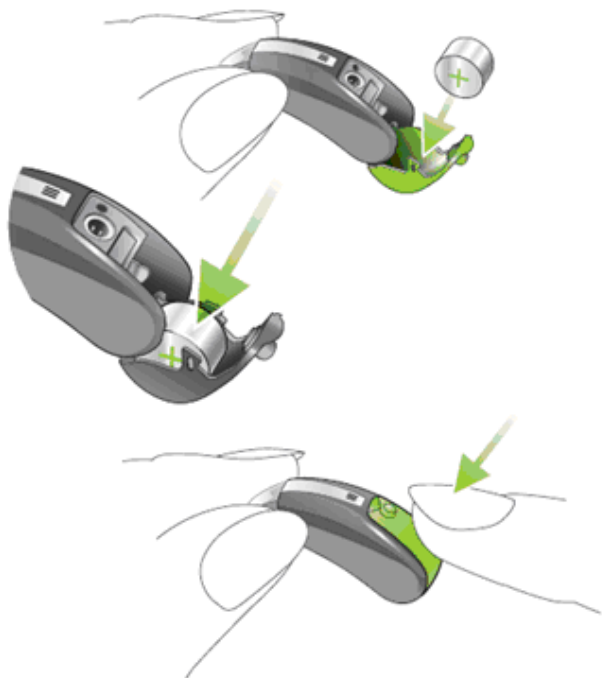




Слуховые аппараты Exélia Art micro Petite могут работать как с батарейками типоразмера 10 (стандарт), так и с батарейками типоразмера 312 (опция). Специалист может соответствующим образом модифицировать ваш слуховой аппарат. Батареяка типоразмера 312 служит дольше. Батареяка типоразмера 10 делает слуховой аппарат более миниатюрным.

батареяка типоразмера 10



батареяка типоразмера 312



-  Обращайтесь с батарейным отсеком аккуратно, без чрезмерных усилий.
-  Если закрывая батарейный отсек Вы испытываете сопротивление, убедитесь, что батарейка вставлена правильно. Если батарейка вставлена неправильно, батарейный отсек не закроется, а слуховой аппарат не будет работать.
-  Если Вы не пользуетесь слуховым аппаратом, оставляйте крышку батарейного отсека открытой для испарения влаги.


Предупреждение о разряде батареи

О разряде батарейки Вас заранее предупредит звуковой сигнал. Обычно он подается за 30 минут до полного разряда батарейки. У батареек высокого качества этот промежуток времени существенно длиннее, поэтому Вы будете слышать предупреждающий сигнал через каждые 30 минут.


Учтите, что при регулярном использовании командного центра myPilot[®], коммуникационного интерфейса iCom[®] и пультов дистанционного управления KeyPilot2 или WatchPilot2 срок службы батарей сокращается.

Блокировка батарейного отсека (опция)

В целях безопасности батарею можно заблокировать внутри батарейного отсека. Защелка легко открывается ногтем. Подденьте выемку защелки ногтем, потяните ее на себя (1), а затем вверх (2).

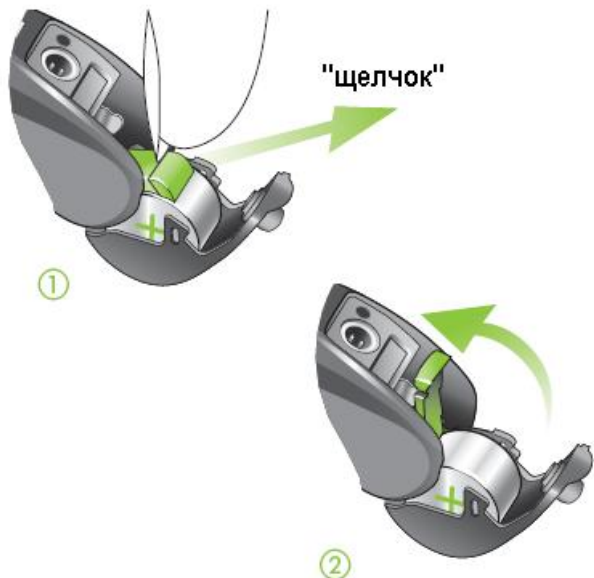

Батарейку можно вставить только в том случае, если защелка находится в верхнем положении (3). Опустите защелку на батарейку (4). Зафиксируйте защелку, надавив на нее, как показано на рисунке (5). Прежде чем закрыть батарейный отсек, убедитесь, что защелка зафиксирована и батарейка не может быть извлечена.

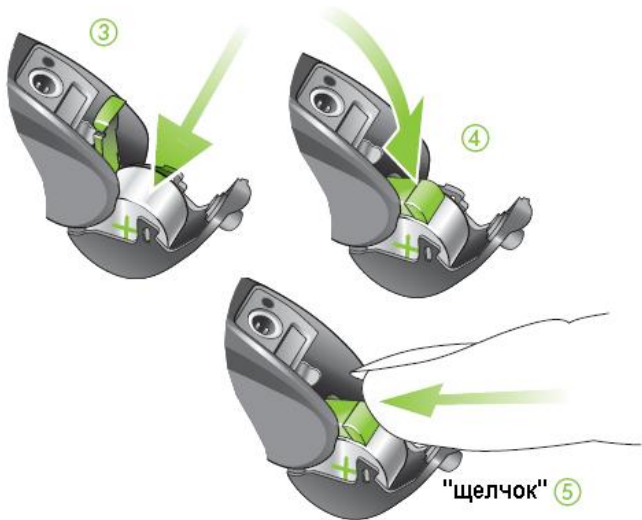


Внимание! Ни в коем случае не закрывайте батарейный отсек, если защелка не зафиксирована.

Маркировка левого и правого слухового аппарата

Важно не перепутать правый и левый слуховые аппараты (если Вы носите два аппарата).

Специалист может маркировать Ваши слуховые аппараты. Левый и правый аппараты будут отличаться цветом маркировки. Применяется следующая цветовая маркировка:

Exélia Art micro

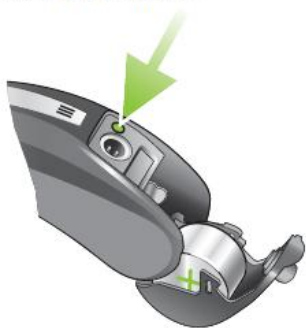

Exélia Art micro Petite




красный = правый слуховой аппарат


синий = левый слуховой аппарат

Надевание слухового аппарата с микрозвуководом

Открытые вкладыши и вкладыши SlimTip:

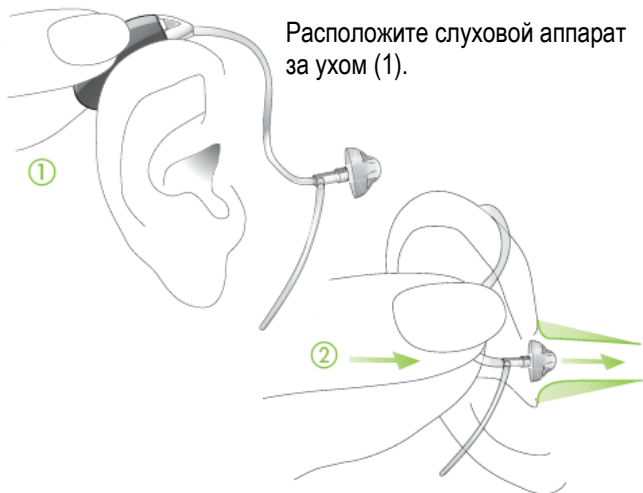

Возьмите микрозвуковод в месте его прикрепления к открытому вкладышу или SlimTip (2) и аккуратно введите в слуховой проход. Открытый вкладыш или SlimTip должен быть введен в слуховой проход достаточно глубоко, так чтобы микрозвуковод прилегал к коже.

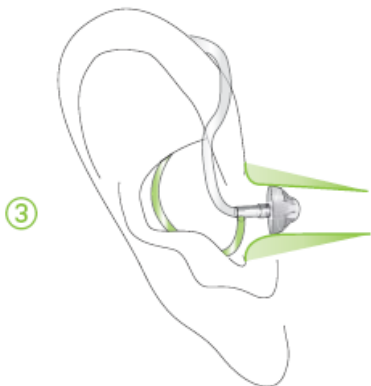

Расположите фиксатор микрозвуковода (при его наличии) в углублении ушной раковины (3).

Чтобы снять слуховой аппарат, захватите микрозвуковод в месте его прикрепления к вкладышу и аккуратно извлеките из уха.

- 🌐 Крайне маловероятно, что при извлечении микрозвуковода из уха вкладыш останется в слуховом проходе. Тем не менее, если это произошло, обратитесь к врачу.

Закрытые вкладыши:

Конструкция закрытого вкладыша отличается от конструкции других вкладышей (см. рис. на следующей странице). Закрытый вкладыш состоит из двух перекрывающихся лепестков. Перед тем, как ввести закрытый вкладыш в слуховой проход, необходимо проверить, правильно ли расположены лепестки. Большой лепесток должен располагаться поверх меньшего (4). Неправильное положение лепестков (5) легко исправить, отогнув, а затем отпустив большой лепесток так, чтобы он расположился поверх меньшего (6). Убедитесь, что линия разреза вкладыша находится в горизонтальной плоскости относительно звуковода, как показано на рис. 4. Теперь вкладыш можно ввести в слуховой проход.


④

Правильное положение



⑤

Неправильное положение

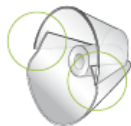


⑥

Перемещение лепестков



Надевание слуховых аппаратов с индивидуальными ушными вкладышами

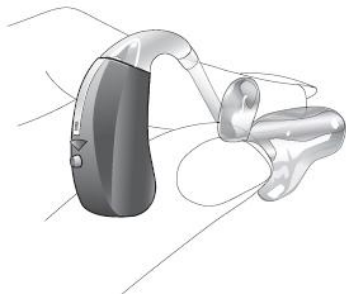

Держите ушной вкладыш большим и указательным пальцами (соответственно стороне того уха, на которое Вы собираетесь надеть слуховой аппарат).



Поднимите руку на уровень уха, так чтобы конец вкладыша был направлен в сторону слухового прохода. Слегка наклоните аппарат с вкладышем вперед.



Введите канальную часть ушного вкладыша в слуховой проход. При затруднении можно другой рукой слегка оттянуть ушную раковину назад и вверх. После этого легким вращательным движением завершите введение ушного вкладыша. При этом его завитковая часть должна оказаться под кожной складкой.



Заведите слуховой аппарат за ухо. Избегайте перекручивания гибкого звуковода.



Проверьте, правильно ли установлен вкладыш. Для этого проведите пальцем вдоль его контура.

Чтобы снять слуховой аппарат, захватите вкладыш (не звуковод) пальцами и аккуратно извлеките его из уха.

Настройка, основанная на Ваших личных предпочтениях

В процессе настройки невозможно воспроизвести все особенности Вашего звукового окружения. Решение этой проблемы – способность вашего слухового аппарата запоминать производимую Вами регулировку громкости. Если Вы пользуетесь myPilot, KeyPilot2 или WatchPilot2, Exélia Art micro / micro Petite предоставляет Вам уникальную функцию, называемую “Self Learning” (самообучение). В памяти слухового аппарата сохраняются все изменения громкости, выполненные Вами вручную. Это означает, что всякий раз, когда Вы меняете громкость слухового аппарата, это действие учитывается для последующего автоматического изменения громкости в аналогичной звуковой ситуации.

Self Learning обеспечивает полностью персонализированную настройку громкости в любой обстановке.

Работа с аппаратом

Включение и выключение

Выключение:



Ногтем приоткройте крышку
батареиного отсека, так чтобы она
зафиксировалась в положении ВЫКЛ.

Включение:



Закройте батарейный отсек. При
включении слуховые аппараты всегда
начинают работать в исходной
программе на запрограммированном
уровне громкости.

Задержка включения

Слуховому аппарату Exélia Art необходимо несколько секунд для включения. Специалист может настроить дополнительный таймер задержки включения (на 9 или 15 секунд) во избежание неприятных звуков при надевании аппарата. Включение подтверждается звуковым сигналом.

Программы прослушивания

Автоматический режим

Exélia Art распознает различные варианты акустической обстановки и автоматически выбирает наиболее подходящую программу прослушивания.

Включение дополнительных программ



При необходимости специалист может настроить для Вас дополнительные индивидуальные программы, предназначенные для конкретной звуковой обстановки. Дополнительные программы могут быть выбраны с помощью командного центра myPilot[®], переключателя программ[⊙] или пультов дистанционного управления KeyPilot2 или WatchPilot2.



Переключатель программ

Переключатель программ позволяет переключаться из автоматического режима в режим заглушения и в отдельные программы прослушивания. Выбор автоматического режима подтверждается коротким мелодичным сигналом.

Модель без переключателя программ

Существует модель Exélia Art micro без переключателя программ. Эта опция предназначена для клиентов, которые предпочитают использовать командный центр myPilot  или пульт дистанционного управления вместо переключателя программ .


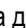
Синхронизированное ручное управление

QuickSync – автоматическая синхронизация программ, интегрированная в ваши слуховые аппараты. Если вы пользуетесь двумя аппаратами, достаточно переключать программы только в одном из них – изменения будут автоматически воспроизводиться во втором аппарате.

ZoomControl

Эта специальная программа позволяет выбрать одно из четырех направлений прослушивания (вперед, назад, влево или вправо). Программа ZoomControl доступна с помощью командного центра myPilot и/или переключателя программ Вашего слухового аппарата.

Индукционная (телефонная) катушка (опция)

Специалист может активировать в Вашем слуховом аппарате телефонную катушку. Она может использоваться при разговоре по совместимому с ней телефону или при нахождении в помещении, оборудованном индукционной петлей (в некоторых школах, театрах, храмах и т.п.). Попросите специалиста распечатать для вас полное описание отдельных программ прослушивания и доступа к ним с помощью командного центра myPilot , переключателя программ  или пульта дистанционного управления.

EasyPhone (опция)

Специалист может активировать в Вашем слуховом аппарате функцию EasyPhone. Она позволяет Вашему слуховому аппарату автоматически включать программу разговора по телефону при поднесении телефонной трубки к уху. Переключение программы подтверждается звуковым сигналом. Слуховой аппарат автоматически возвращается в предыдущую программу прослушивания при отдалении телефонной трубки от уха.

Некоторые телефоны обладают магнитным полем, достаточным для активации функции EasyPhone. Однако у большинства телефонов для этого необходимо прикрепить к трубке дополнительный магнит.

Прикрепление магнита EasyPhone




Тщательно протрите телефонную трубку. Держите трубку вертикально, как при обычном телефонном разговоре. Поднесите магнит к динамику трубки и отпустите его. Магнит автоматически прикрепится к трубке нужной стороной.



Если при разговоре по телефону Вы держите трубку в правой руке, прикрепите магнит к верхней правой части телефонной трубки.

Если Вы привыкли держать телефон в левой руке, прикрепите магнит к верхней левой части телефонной трубки.

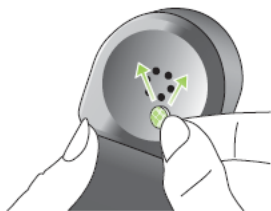

Для приклеивания магнита к выбранному участку телефонной трубки воспользуйтесь двусторонней клеящей пленкой. Не заклеивайте отверстия динамика телефонной трубки.






Не прижимайте телефонную трубку к уху. Поместите ее напротив микрофона слухового аппарата, расположенного в его передней части.

Использование EasyPhone

Пользуйтесь телефоном, как обычно. Включение функции EasyPhone подтверждается звуковым сигналом. Вам может потребоваться некоторое время для выбора положения телефонной трубки, обеспечивающего надежное включение функции EasyPhone и комфортное звуковосприятие.

При необходимости Вы можете переклеить магнит в положение, соответствующее максимальному удобству использования телефона.

-  Храните магниты в недоступном для детей и домашних животных месте. При случайном проглатывании магнита обратитесь за помощью к врачу.
-  Магнит, используемый для усиления магнитного поля Вашего телефона, может повлиять на работу некоторых медицинских устройств или электронных систем. Всегда держите магнит (или телефон, снабженный магнитом) на расстоянии не менее 30 см от кардиостимуляторов, кредитных карт, дискет и других чувствительных к магнитному полю устройств.
-  Значительные искажения при наборе номера и разговоре по телефону могут означать, что магнит непосредственно влияет на динамик телефона. Во избежание повреждения телефона переместите магнит в другое положение.

Беспроводные аксессуары (опция)

myPilot

Командный центр myPilot – дополнительная принадлежность Ваших слуховых аппаратов. Он позволяет легко и удобно управлять всеми функциями Вашего слухового аппарата.

- Регулировка громкости
- Выбор программы
- Выбор автоматического режима
- Доступ к программе ZoomControl
- Часы и будильник
- Состояние батареи myPilot
- Считывание уровня громкости, текущей программы и состояния батареи слухового аппарата.

Подробную информацию об использовании myPilot вы найдете в соответствующем руководстве по эксплуатации или обратившись к специалисту.

myPilot выпускается в двух вариантах: серый хай-тек и белый.



Для оптимальных результатов держите myPilot так, как показано на рисунке.



Радиус действия myPilot не превышает 50 см.

- 🌐 Не пользуйтесь myPilot там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.

iCom

iCom – дополнительная принадлежность к слуховым аппаратам Exélia Art. Одним нажатием на кнопку вы сможете подключить ваши слуховые аппараты к внешним устройствам.


Соединение Bluetooth

iCom позволяет без труда подключить мобильный телефон к вашим слуховым аппаратам по каналу Bluetooth.



iCom также может передавать звуковой стереосигнал от любого устройства, снабженного Bluetooth (встроенный или через адаптер), например MP3-плеера, ноутбука, настольного компьютера, телевизора.

Более подробную информацию о разнообразных функциях iCom вы можете получить, обратившись к соответствующему руководству по эксплуатации.

-  Не пользуйтесь iCom там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.


Совместимость с FM

iCom предоставляет пользователю доступ к FM-технологиям при подключении FM-приемника Phonak.



EasyAudio и EasyBluetooth

В ваших слуховых аппаратах имеются две специальные аудиопрограммы: EasyAudio и EasyBluetooth. Они включаются автоматически, при прослушивании музыки и разговоре по мобильному телефону посредством iCom. Переключение слухового аппарата в каждую из этих программ сопровождается подтверждающим звуковым сигналом.


-  Не пользуйтесь iCom там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.

iView

iView (устройство для считывания состояния слуховых аппаратов) – дополнительная принадлежность, предназначенная для родителей маленьких детей и педагогов. Нажав на кнопку, вы сможете получить информацию о состоянии батарей слуховых аппаратов, текущей программе и уровне громкости. Вся информация выводится на экран iView.

Чтобы больше узнать об использовании iView, обратитесь к соответствующему руководству по эксплуатации или к специалисту.



 Не пользуйтесь iView там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.

Пульты дистанционного управления (опция)

Phonak предлагает большой выбор современных пультов дистанционного управления. Попросите специалиста продемонстрировать все пульты, чтобы вы смогли выбрать наиболее соответствующий вашему вкусу и образу жизни.

WatchPilot2


Эксклюзивный и современный, производится в мужском и женском вариантах, со спортивным резиновым ремешком или элегантным металлическим браслетом.



KeyPilot2


Миниатюрный, простой и удобный



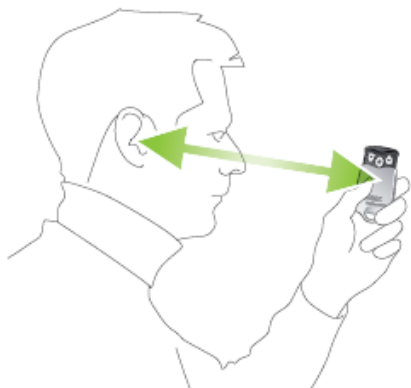


Для достижения оптимальных результатов держите KeyPilot2 или WatchPilot2, как показано на рисунке.

Подробная информация об использовании пультов дистанционного управления приводится в соответствующих руководствах по эксплуатации. Кроме того, специалист может распечатать для вас описание доступных программ прослушивания.

 Не пользуйтесь пультами дистанционного управления там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.

FM-устройства (опция)

Ваш слуховой аппарат снабжен прямым аудиовходом (DAI). Это позволяет Вам полностью воспользоваться преимуществами, предоставляемыми современными FM-системами Phonak .

FM-системы существенно облегчают общение в условиях шума, реверберации или большого расстояния до источника звука. Система беспроводной FM-связи состоит из передатчика и приемника. Передатчик помещают вблизи источника звука или непосредственно подключают к нему (например, к телевизору или радио).

Передатчик посылает сигнал в FM-приемник, подключенный к слуховому аппарату или к устройству iCom.

Чтобы больше узнать о приемниках и передатчиках FM, обратитесь к соответствующему руководству по эксплуатации или к специалисту.

Динамические FM-передатчики

Phonak предлагает большой выбор динамических FM-передатчиков, отвечающих различным потребностям:



inspiro

Передатчик для педагогов,
предназначенный для использования в
образовательных учреждениях



SmartLink+

Для подростков и взрослых,
предпочитающих только самое лучшее



ZoomLink+

Удобный передатчик для любого
пользователя




EasyLink+

Самый простой в обращении передатчик

Многочастотные FM-приемники

Для использования с Вашим слуховым аппаратом Exélia Art мы рекомендуем FM-приемник MicroLink ML12i.

MicroLink ML12i : Великолепно интегрирован в дизайн Exélia Art micro. Позволяет легко включать и выключать слуховой аппарат.



MyLink

MyLink – альтернатива использованию iCom с FM-приемником. Это миниатюрный привлекательный FM-приемник, совместимый со слуховыми аппаратами, снабженными индукционной катушкой. MyLink принимает FM-сигнал и направляет его в слуховые аппараты.





EasyFM

Функция EasyFM автоматически включает FM-программу при обнаружении FM-сигнала, если Ваш слуховой аппарат с подключенным FM-приемником находится в автоматическом режиме. Включение подтверждается звуковым сигналом. При отключении FM-сигнала слуховой аппарат возвращается в автоматический режим.

Вы можете вручную выйти из режима EasyFM с помощью переключателя программ или пульта дистанционного управления.

Выбор FM-программы вручную

- **Командный центр myPilot** : выберите нужную программу FM. Включение подтверждается звуковым сигналом.
- **Переключатель программ** : нажимайте на него до тех пор, пока не включится нужная FM-программа. Включение подтверждается звуковым сигналом.
- **Пульты дистанционного управления**: KeyPilot2 или WatchPilot2 позволяют переключать программы, настроенные специалистом.

Уход за аппаратом

Защитный фильтр

Примечание: Защитный фильтр – эксклюзивная система, разработанная компанией Phonak для защиты высококачественных микрофонов Exélia Art от загрязнения. В результате микрофоны служат гораздо дольше, уменьшая расходы на обслуживание Ваших слуховых аппаратов. В случае необходимости защитный фильтр можно заменить. Ни в коем случае не пользуйтесь слуховыми аппаратами без защитного фильтра.



Внимание: Проконсультируйтесь со специалистом относительно замены защитных фильтров, если Вы заметили, что:

- Слуховой аппарат звучит тише, чем обычно
- Ухудшилось качество звука
- Появились затруднения при общении в шумной обстановке
- Стало труднее определять положение источника звука

Специалист скажет вам, нужно ли заменить защитный фильтр.

Микрозвуковод и стандартный вкладыш

Приводимые ниже инструкции помогут Вам продлить срок службы слухового аппарата, снабженного микрозвуководом, и обеспечить качество и комфортность звучания.

Микрозвуковод передает усиленный звук от слухового аппарата в ухо. Важно, чтобы микрозвуковод и стандартный вкладыш или SlimTip были правильно подобраны и введены в ухо. Если микрозвуковод, стандартный вкладыш или SlimTip раздражают ухо и вынуждают Вас отказываться от использования слухового аппарата, обратитесь к специалисту. Не пытайтесь самостоятельно изменить форму микрозвукоиода. Микрозвуковод, стандартный вкладыш или SlimTip необходимо регулярно чистить.

Шаг 1


Удалите серу с защитной сеточки вкладыша с помощью щетки или ткани.


Если звучание аппарата не улучшилось, перейдите к шагу 2.

Шаг 2

Отсоедините тонкий звуковод от слухового аппарата следующим образом:

- Возьмите тонкий звуковод в одну руку, а слуховой аппарат – в другую.
- Аккуратно поверните тонкий звуковод на 90° (1) и отделите его от слухового аппарата (2).

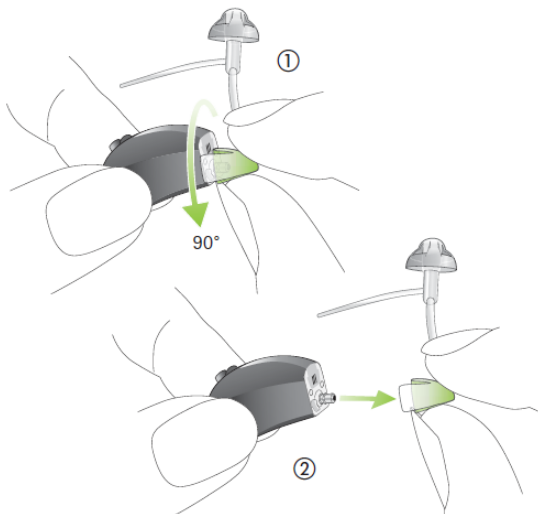


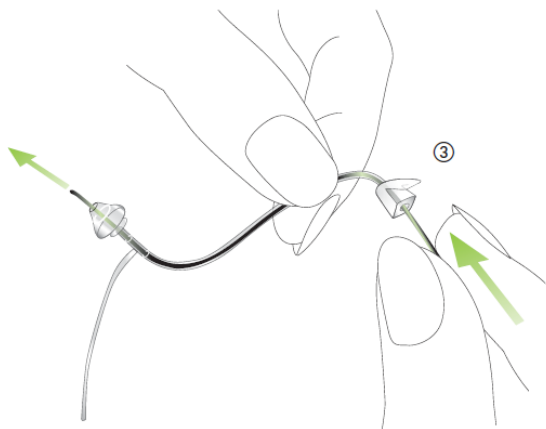

Вставьте чистящую леску в тот конец звуковода, которым он прикрепляется к слуховому аппарату и протолкните ее по всей длине звуковода, включая стандартный вкладыш или SlimTip (3). После этого не забудьте извлечь чистящую леску.

Присоедините тонкий звуковод к слуховому аппарату следующим образом:

- Возьмите тонкий звуковод в одну руку, а слуховой аппарат – в другую.
- Присоедините тонкий звуковод к трубочке на корпусе слухового аппарата (4) до защелкивания.

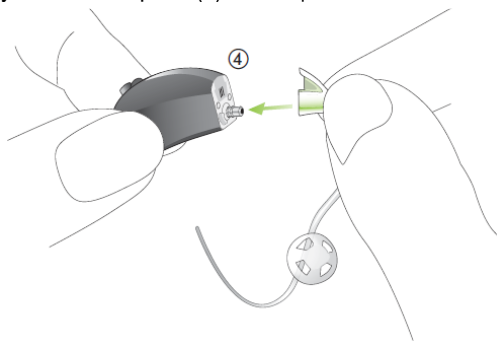

- ❏ Не рекомендуется промывать звуковод, стандартный вкладыш или SlimTip водой, т.к. капли воды могут остаться в просвете звуковода. Попадание воды в звуковод может привести к нарушению проведения звука по звуководу.
- ❏ Тонкий звуковод и стандартный вкладыш необходимо заменять не реже одного раза в три месяца, а также при признаках затвердения или ломкости трубочки. Стандартный вкладыш должен заменяться только специалистом. В противном случае он может отсоединиться от звуковода и повредить ухо при надевании аппарата.

Техническое обслуживание.

Условия эксплуатации

1. При замене батареек пользуйтесь только новыми элементами питания.
2. Если Вы не пользуетесь аппаратами, оставляйте батарейные отсеки открытым для испарения влаги.
3. Если Вы не пользуетесь аппаратами длительное время, храните их в оригинальной упаковке. Выньте батарейку и оставьте батарейный отсек открытым. Прежде, чем закрыть упаковку, убедитесь, что слуховой аппарат абсолютно сухой.

4. Оберегайте аппараты от излишней влаги и тепла. Не забывайте снимать их перед купанием и плаванием. Не оставляйте аппараты на подоконнике или в закрытом салоне автомобиля. Избегайте ударов и вибрации.
5. Осуществляйте ежедневную чистку и просушивание СА, используя специальные средства по уходу (за советом обратитесь к специалисту). Никогда не используйте моющие средства (порошки, мыло и т.д.) для очистки аппарата. Проконсультируйтесь со специалистом.
6. Лак для волос, крем и косметика могут повредить слуховые аппараты. Снимайте СА перед применением косметических средств.
7. Обратитесь к врачу при появлении признаков раздражения кожи или воспаления в области уха.
8. Если Ваш СА не работает при правильно вставленном элементе питания, обратитесь к специалисту. Если Вы пользуетесь дополнительными аксессуарами (myPilot, iCom или пульты дистанционного управления), не забудьте представить их для проверки вместе со слуховым аппаратом.

Информация по безопасности

- 🌐 Батарейки, используемые в слуховых аппаратах, токсичны, не допускайте их проглатывания! Храните их в недоступных для детей и домашних животных местах. При случайном проглатывании батарейки немедленно обратитесь к врачу!
- 🌐 Пользуйтесь только теми слуховыми аппаратами, которые были запрограммированы специально для Вас. В противном случае аппараты будут неэффективны или даже могут нанести вред Вашему слуху.
- 🌐 Рентгеновское излучение (например, компьютерная или магнитно-резонансная томография) может нарушить работу Ваших слуховых аппаратов. Мы рекомендуем снимать слуховые аппараты перед прохождением рентгенологического обследования и оставлять их вне помещения, в котором проводится обследование.
- 🌐 В режиме направленного микрофона слуховые аппараты подавляют окружающий шум. При этом предупреждающие сигналы или гудок приближающегося автомобиля могут быть частично или полностью подавлены, если их источник находится позади Вас.
- 🌐 Внесение неавторизованных изменений в описанные в настоящем руководстве устройства не допускается.

Соответствие

Слуховые аппараты Exélia Art micro / micro Petite соответствуют следующим международным стандартам помехоустойчивости:

FCC ID: KWC-WHSBTE

IC: 2262A-WHS

RSS-210

ICES-003

Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание слухового аппарата Exélia Art micro / micro Petite осуществляет компания _____.

Средний срок службы слухового аппарата Exélia Art micro / micro Petite пять лет.

Бесплатное гарантийное обслуживание слухового аппарата Exélia Art micro / micro Petite осуществляется в течение двух лет со дня продажи (с отметкой о ремонте в гарантийном талоне) при:

- наличии даты продажи, печати и подписи представителя предприятия-изготовителя или торгующей организации в данном руководстве и гарантийном талоне;
- предъявлении изделия в чистом виде.

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи в гарантийном талоне, гарантийные обязательства на слуховой аппарат Exélia Art micro / micro Petite вступают в силу с даты проверки.

Гарантийные обязательства не распространяются на слуховые аппараты Exélia Art micro / micro Petite:

- с механическими повреждениями;
- носящие следы химического воздействия
- подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- при обращении в неуполномоченные сервисные центры

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Свидетельство о приемке и продаже

Слуховой аппарат **Exélia Art** _____ (Phonak)
серийный № _____

FM-приемник _____ (Phonak) серийный №
_____ признан годным для эксплуатации.

Слуховой аппарат Exélia Art micro / micro Petite
сертифицирован. Сертификат соответствия
РОСС СН.АЯ46.В70396 от 18.05.2009.

Дата проверки _____

Штамп

Дата продажи _____

м.п.

*Адрес предприятия, осуществляющего
гарантийное обслуживание:*

ТАЛОН № 2 на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат Exélia Art _____

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп _____

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

Корешок талона №2
на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат

Exélia Art _____

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

ТАЛОН № 1 на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат Exélia Art _____

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп _____

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

Корешок талона №1
на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат

Exélia Art _____

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

Фонак АГ,
Лаубисрутиштрассе 28,
СН-8712 Штефа, Швейцария

Центр слухопротезирования:

